

Merkblatt für Einlagen

Kurzfassung des Merkblattes vom 01.09.1998 „orthopädische Einlagen“. Das ausführliche Merkblatt ist bei Winkler ORTHO SCHUH TECHNIK erhältlich.

Name: _____ Datum: _____

Vorname: _____ Nr. _____

Geb. Datum: _____ Tel: _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort: _____

Informationen und Sicherheitshinweise

Mit Ihren neuen Einlagen haben Sie ein medizinisches Hilfsmittel im Sinne des Medizin-Produkte Gesetzes (MPG) erhalten. Es entspricht den Anforderungen des Anhangs I der EG Richtlinie 93/42/ EWG.

Bitte beachten Sie daher die nachfolgenden Gebrauchsanweisungen sowie Hinweise

Zweckbestimmung

Die Einlagen sind ein Hilfsmittel, das für Sie individuell angefertigt wurde. Sie sind nur in dafür geeignetem und passendem Schuhwerk zu tragen.

Eingewöhnung

- Die Füße müssen sich an die korrigierende Einlage erst gewöhnen; tragen Sie sie am Anfang nur kürzere Zeit und steigern Sie kontinuierlich.
- Nach ca. 2 Wochen sollten sie ganztags bequem getragen werden können.

Kontrolltermin

- Wenn die Einlagen unangenehm drücken oder reiben sofort
- Wenn vorhandene Schmerzen nicht nachlassen oder nicht wesentlich besser werden nach 2 Wochen
- Zur eventuellen Auffrischung oder Erneuerung nach 1- 2 Jahren
- Bei Kindern das erste Mal nach 4 Wochen
nächste Mal nach 12 Monaten

Diabetiker

Weisen Sie bei jedem Besuch und bei jeder Terminvereinbarung darauf hin, dass Sie Diabetiker sind!

Patrick
WINKLER
ORTHO SCHUH TECHNIK



Eidg. dipl. OSM
Hammerstrasse 14
(beim Wettsteinplatz)
Tel. 061 691 00 66

zertifiziert nach EN 13485
und EN 9001
info@winkler-osm.ch
www.winkler-osm.ch